


Urinální sáček

Jak se používá Conveen Contour urinální sáček

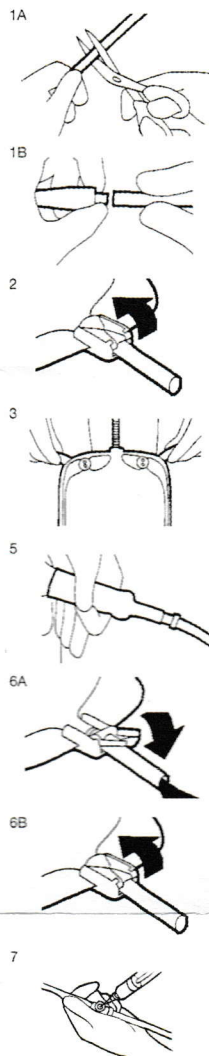

- Jestliže konektor není předem připojený k hadičce:
 - Hadičku je možné zkrátit na potřebnou délku běžnými nůžkami.
 - Chcete-li připojit konektor k hadičce, zmáčkněte hadičku několik centimetrů od konce a přitom zasuňte konektor co nejdále do hadičky.
- Diskrétní močové sáčky jsou vždy baleny s otevřeným vypouštěcím ventilem. Před použitím urinálního sáčku se ujistěte, že vypouštěcí ventil urinálního sáčku je uzavřen. Vypouštěcí ventil uzavřete přitlačením klapky směrem nahoru k sáčku, až zapadne do správné pozice.
- Připevněte sáček k noze pomocí pásek opatřených knoflíky. Po stranách urinálního sáčku jsou pro knoflíky vystřižené otvory. Sáček bezpečně připevněte k noze a upravte pásek, aby pohodlně seděl. Pásky nepřipevňujte příliš pevně k noze, aby nedošlo ke zhoršení cirkulace krevního oběhu. Jsou-li pásky delší, můžete je ustříhnout. Perete-li pásky při teplotě 40°, srazí se přibližně o 2%.
- Pokud má konektor nasazený ochranný kryt, odstraňte ho.
- Konektor pevně spojte s urinálním kondomem nebo s katetrem a ujistěte se, že urinální kondom, katetr anebo hadičky nejsou zalomeny nebo stlačeny a moč může volně odtékat.
- Chcete-li urinální sáček vyprázdnit, vypustte jeho obsah do toalety nebo jiné vhodné nádoby. Vypouštění urinálního sáčku je snadnější, uvolníte-li nejprve připevňovací pásky. Po vyprázdnění nezapomeňte vypouštěcí ventil opět uzavřít. Vypouštěcí ventil uzavřete přitlačením klapky směrem nahoru k sáčku, až zapadne do správné pozice.
- Pouze pro sterilní sáčky. Vzorek moči může být v případě potřeby odebrán přes vzorkovací port pomocí injekční stříkačky a jehly. Odebrání vzorku moči přes vzorkovací port je jednodušší při mírném naklonění injekční stříkačky a jehly.
- Conveen** diskrétní urinální sáček je možné snadno připojit na **Conveen** noční urinální sáček o objemu 1500 ml (objednací kód 5062 a 5063). Ujistěte se, že vypouštěcí ventil na nočním sáčku je uzavřený. Konektor nočního urinálního sáčku pevně spojte s výpustí **Conveen** diskrétního urinálního sáčku a otevřete jeho vypouštěcí ventil. Odpojení nočního sáčku: nejdříve uzavřete vypouštěcí ventil urinálního sáčku, pak teprve opatrně vykrutíte konektor nočního urinálního sáčku. Nedotýkejte se otevřeného konce konektoru a vždy si umyjte ruce před a po připojení a odpojení urinálního sáčku. Vyměňujte sáčky dle postupů a doporučení platných v České republice.
- Sterilní pomůcky:** Jednotlivě balené sáčky jsou sterilní až do otevření nebo poškození obalu. Výrobek neresterilizujte. Pouze pro jedno použití. Použití výrobku jiným způsobem, než doporučuje společnost Coloplast, může vést k ublížení na zdraví nebo jiným škodám, za které Coloplast nenese zodpovědnost.

CE Coloplast A/S
3050 Denmark Nesterilní

CE Coloplast A/S
0543 3050 Denmark Sterilní

IFU11495 Logo společnosti Coloplast je zapsaná ochranná známka společnosti Coloplast A/S.
© [2010-05.] Všechna práva vyhrazena Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Dánsko.

Varování

Opakované použití tohoto produktu, který je určen pro jedno použití, může představovat potenciální riziko pro uživatele. Nové použití, čištění, dezinfekce a sterilizace mohou narušit charakteristiky produktu, které pak mohou představovat další riziko fyzického poškození nebo infekci pacienta.

Tento produkt obsahuje ftaláty a neměl by se používat u dětí nebo těhotných nebo kojících žen bez předchozí konzultace lékaře.

Upozornění

Coloplast nenes zodpovědnost za jakékoliv poškození nebo jinou ztrátu, která by mohla vzniknout, pokud je produkt používán způsobem, který není v souladu s návodem k použití společnosti Coloplast.

Informace

Conveen diskrétní urinální sáček s přívodní hadičkou má objem 600 ml nebo 800 ml.

Symbol



Obsahuje nebo přítomnost ftalátu: bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)